

ezaligner®



por que o alinhador funciona?

Os alinhadores ezaligner são projetados especificamente para a boca de cada paciente. **Ao usar o alinhador, uma pressão controlada é aplicada aos dentes, movendo-os gradualmente para a posição desejada.**

A cada etapa do tratamento, um novo conjunto de alinhadores é fornecido para continuar o processo de alinhamento.

como o alinhador é feito?

Tudo começa com um escaneamento 3D detalhado da sua boca, o que permite uma visão completa da situação dos dentes. Essas imagens são processadas em um software avançado, que fornece um setup virtual da sua boca, no qual **um ortodontista especializado ajusta cada movimentação dos dentes em etapas, de acordo com as instruções do seu dentista**, formando o planejamento do tratamento.

como o alinhador é feito?

Com o planejamento aprovado pelo seu dentista, **são criados modelos 3D em impressoras de alta precisão, de onde cada alinhador é fabricado especificamente para sua boca.** Unimos tecnologia e sofisticação para garantir a melhor qualidade e eficácia no seu tratamento.

o que são attachments?

Attachments são pequenas projeções de resina colocadas nos dentes durante o tratamento. **Eles atuam como pontos de ancoragem que melhoram a aderência e eficácia dos alinhadores, permitindo movimentos mais precisos e complexos.** São geralmente da mesma cor dos dentes, tornando-os discretos durante o tratamento. Ao final, são removidos sem causar danos aos dentes.



e as mecânicas auxiliares?

Em determinadas situações, **especialmente quando se tratam de problemas específicos de mordida ou movimentos dentários mais complexos, o uso de elásticos em conjunto com os alinhadores pode ser recomendado.** Os elásticos ajudam a aplicar forças adicionais, permitindo correções mais eficientes.



quanto tempo devo usar?

O paciente deve buscar **um tempo de uso em volta de 20 a 22 horas por dia.** O

alinhador deve ser usado o tempo todo, removendo apenas para:

comer

consumir de bebidas quentes

higienizar os dentes

fumar cigarro ou cigarro eletrônico



quando trocar o alinhador?

Vários fatores são levados em conta nessa decisão como idade do paciente, andamento do tratamento, complexidade.

Seu dentista fornecerá um plano de tratamento específico e orientará sobre quando mudar para o próximo **conjunto**. A faixa de tempo de troca varia de 7 a 14 dias.

vou sentir dor?

Os alinhadores podem causar uma ligeira sensação de pressão quando você começa a usar um novo conjunto.

Essa sensação é um sinal de que os alinhadores estão fazendo seu trabalho e movendo seus dentes. A maioria dos pacientes relatam que a sensação diminui em poucos dias. E quem já passou por um tratamento de ortodontia fixa tende a dizer que o tratamento com alinhadores é muito mais tolerável.



respeite sua disciplina

**Alinhador não é um produto,
alinhador é um tratamento.**

A disciplina do paciente é um dos pilares para o sucesso desse tratamento. Diferente dos aparelhos fixos, os alinhadores são removíveis e, por isso, dependem do seu compromisso diário com o uso contínuo, conforme orientado pelo seu dentista.

respeite sua disciplina

Cada etapa do tratamento foi planejada cuidadosamente para guiar os dentes em pequenas movimentações, e o uso regular dos alinhadores é essencial para que esses movimentos aconteçam de maneira eficaz e no tempo correto. **A adesão à disciplina recomendada não só acelera o processo, mas também ajuda a prevenir desconfortos e evitar a necessidade de ajustes no planejamento.**



respeite sua disciplina

Ao fazer a sua parte, você maximiza a eficiência dos alinhadores para atingir os resultados alinhados às suas expectativas.